

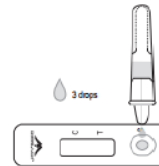


KURZANLEITUNG


ZUM JOYSBIO ANTERIO NASAL ANTIGEN-SELBSTTEST

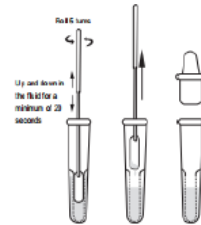

- 1** Führen Sie den Tupfer ca. 2,5 cm in ein Nasenloch ein. Das Stäbchen 5-mal drehen und den Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen.
- 2** Die Pufferflasche aufschrauben und die gesamte Lösung in das Extraktionsreagenzglas drücken. Das Stäbchen einführen und 20 Sekunden drehen. Das Röhrchen von beiden Seiten zusammendrücken, um die Flüssigkeit aus dem Wattestäbchen zu extrahieren.
- 3** Stäbchen entnehmen und dabei das Röhrchen zusammendrücken. Kappe schließen und die Düsenkappe fest auf das Extraktionsröhrchen mit der verarbeiteten Probe drücken. Anschließend das Röhrchen gut schütteln.
- 4** Testkassette aus der Verpackung nehmen und auf eine saubere und flache Oberfläche legen. Kappe abdrehen und Röhrchen vorsichtig zusammendrücken. 3 Tropfen auf Testkassette tropfen.
- 5** Wartezeit: 15 Minuten warten. Danach das Ergebnis ablesen. Nach 20 Minuten ist das Ergebnis ungültig.

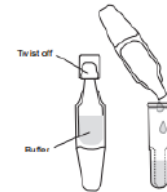


6 Positives Testergebnis:
Es erscheinen zwei Linien - eine farbige Linie im Qualitätskontrollbereich (C) und eine farbige Linie im Testbereich (T)

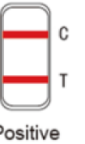

Negatives Testergebnis:
Nur eine farbige Kontrolllinie (C) erscheint.



Ungültiges Testergebnis:
Die Kontrolllinie (C) wird nicht angezeigt.

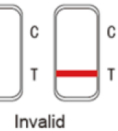

Hinweis: Die Reagenzgläser und Tupfer können nicht wiederverwendet werden.

Bei weiteren Fragen bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

istac